

PŘENOSNÁ SVĚTELNÁ TERAPIE

Souprava pro pacienta a ovladač

Náplast CareWear vyzařuje pronikající pulzní fotonovou energii pomocí červené a modré části světelného spektra, uklidňující teplo poskytuje trvalou úlevu od přetrvávající bolesti a svalového napětí. Sada pro pacienty s ovladačem CareWear poskytuje možnost vynikající domácí péče a udržování stavu mezi ošetřeními na klinice ve spojení s domácími cvičebními programy

Souprava pro pacienta obsahuje

- Návod k použití
- Rychlý návod k použití
- Jeden ovladač, který může být použit se všemi světelnými náplastmi CareWear
- Univerzální nabíjecí podložka USB 2.0
- Pohodlné cestovní pouzdro se zipem s prostorem pro další světelné náplasti



Praktická a
snadno
mpoužitelná
uživatelská

KOMPONENTY CAREWEAR

Opakovaně použitelná světelná náplast



Tištěné LED zdroje umístěné do ultra tenkých samolepicích hydrogelových náplastí s až 1500 LED zdroji na jednu náplast. Zajišťuje vysoce účinnou terapii pomocí světelných zdrojů LED již ve 30 minutách

Bezdrátový ovladač



Ovladač funguje jako zdroj napájení a dávkovač. Ovladač je možné dobít a je vodotěsný a je

předem naprogramován tak, aby vyslal správnou dávku léčivé světelné energie do každé náplasti CareWear.

Náhradní světelné náplasti



Náhradní světelné náplasti se dodávají v několika tvarech a velikostech vyhovujících tvarům těla. Každé balení obsahuje 10 náplastí, které lze při správné péči použít až 20krát.

CareWear
Wearable Therapeutics

Navrženo v USA
Vyrobeno pro
CareWear Corp.
na Taiwanu a v
USA

CE
2460

© 2021 CareWear Corp.
Veškerá práva

CareWear
Wearable Therapeutics

Přenosná
světelná terapie v
domácím
prostředí

NÁVOD K POUŽITÍ

Úleva od a
zotavení po:

bolesti hlavy a krku

bolesti zad

bolesti hlavy

artritidě kolenní

Fotobiomodulace a zklidňující teplo
pro péči na jakémkoliv místě



OBJEDNÁVKA SVĚTELNÝCH
NÁPLASTÍ
carewear.net

Úleva od bolesti a světelná terapie odstraňující

bolesti hlavy a krku

bolesti zad

bolesti hlavy

bolesti kolen

a také bolesti v dalších částech těla podle předpisu vašeho lékaře.

Úleva od bolesti a uvolnění svalů

Přenosná náplast CareWear vyzařuje pronikající pulzní fotonovou energii pomocí červené a modré části světelného spektra, uklidňující teplo a poskytuje trvalou úlevu od přetrvávající bolesti a svalového napětí.

Úleva od bolesti bez použití léků

Světelné náplasti CareWear jsou alternativou léčby pomocí léků jako je acetaminofen, nesteroidní antiflogistika (NSAID) a opiáty. Bolest je léčena bez nežádoucích vedlejších účinků.

CareWear® Přenosné náplasti versus léky proti bolesti

	Snížení bolesti	Omezení zánětu	Bezpečné dlouhodobé používání	Bez vedlejších účinků
CareWear	✓	✓	✓	✓
NSAID	✓	✓		
Acetaminofen	✓			
Opiáty	✓			


Úleva bolesti za pochodu

Zrychlete regeneraci přímo ve svalu nebo bolestivém kloubu pomocí opakovaně použitelných samolepicích světelných náplastí CareWear, které zajišťují trvalou úlevu od bolesti a zároveň snižují svalové napětí a ztuhlost kloubů.

Zlepšete hybnost

- Omezte bolestivost ztuhlost kloubů a zlepšete krevní oběh pomocí použití světelných náplastí CareWear před cvičením.
- Zvyšte vytrvalost svých svalů a stabilitu kloubů.
- Dejte se do pohybu s náplastmi Self Care, které neobsahují žádné léčivé látky a vraťte se ke zdravějšímu a aktivnějšímu životnímu stylu.

Náplasti CareWear používejte doma, mezi ošetřeními na klinice nebo k urychlení regenerace po ošetření výkonným laserem, rázovou vlnou nebo tlakovou a vibrační masáží.

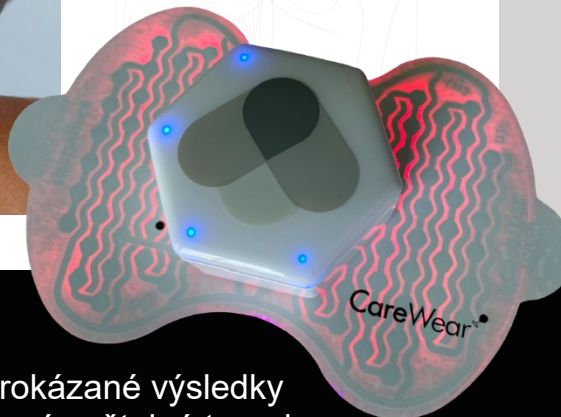

Prokázané výsledky
Účinná světelná terapie

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kolikrát je možné použít světelnou náplast?

Použití světelné náplasti se liší podle druhu péče a pokožky, ale náplast by měla být vyměněna, jakmile už dobře nepřilne k pokožce. Správná příprava pokožky a vhodné skladování náplasti mohou prodloužit její životnost. Náplasti zpravidla vydrží 20 použití.

Můžete prodloužit životnost světelné náplasti?

Řádné očištění pokožky před nalepením náplasti může minimalizovat ulpívání potu, tělesného tuku, odumřelé kůže a chloupků na lepivém hydrogelu náplasti. Jestliže světelná náplast přestala lepit, zvlhčete hydrogel, tak že na něj prstem nanese několik kapek vody a jemným třením hydrogel rehydratujete. Správné zacházení s náplastí zabraňující vysychání na vzduchu a působení UV záření ji může prodloužit její životnost. Po každém použití náplasti ji nezapomeňte položit zpět na průhlednou vložku a uložit ji do uzavíratelného sáčku na zip. Náplast také nesmíte stříhat, přehýbat nebo vytahovat jinde než v místě jazýčků. Na náplast si nestoupejte ani na obal náplasti nevyvíjejte příliš silný tlak.

Mohu kombinovat světelnou náplast CareWear s jinými způsoby léčby bolesti?

Ano. Světelné náplasti CareWear jsou způsobem léčby, který nepoužívá léčiva a který lze používat v kombinaci s jinými terapiemi.

Mohu světelné náplasti CareWear používat s topicky nanášenými krémy a gely?

Ano. Topické krémy a gely by se však NEMĚLY nanášet na místo léčby bezprostředně před aplikací světelné náplasti, protože by mohlo dojít k poškození hydrogelu nebo k přehřívání.

Je bezpečné používat světelné náplasti CareWear na potetovanou kůži?

Nižší úroveň toku, intenzity záření a změny teploty, které náplasti CareWear poskytují, nejsou dostatečné pro lokální zahřívání červených, modrých nebo černých míst tetování.

Mohou světelné náplasti CareWear používat děti?

Světelné náplasti CareWear mohou používat dospělí a děti od 13 let. Pokud chcete použít náplast u dětí mladších 13 let, nejprve se poraďte s lékařem.

TECHNOLOGIE CAREWEAR®

Snadno použitelná a neomezená
přenosná úleva